

GHID RAPID

Usor de instalat.



Pasul 1

Alege partea din spate a bratului superior ca loc de aplicare.

Atentie: Evita zonele cu cicatrici, alunite, vergeturi sau umflaturi.



Pasul 2

Curata locul de aplicare folosind comprese imbibate in alcool.

Atentie: Asteapta ca pielea sa se usuce inainte de a trece la pasul urmator.



Pasul 3

Roteste si deschide capacul de jos al Aplicatorului.



Pasul 4

Indeparteaza capacul de siguranta din partea de sus a Aplicatorului.

Atentie: Nu atinge inca butonul de lansare aflat sub capacul de siguranta.



Pasul 5

Plaseaza Aplicatorul deasupra locului de aplicare, apasa butonul de lansare si indeparteaza usor Aplicatorul. Monitorul ar trebui acum sa fie atasat de piele.



Pasul 6

Apasa usor banda adeziva in jurul marginii Monitorului pentru a-l fixa bine pe piele.

Dupa ce ai terminat, urmeaza instructiunile din APLICATIE pentru a incepe sa folosesti Monitorul.

