

FISA TEHNICA

SCAUN DE DUS DIN ALUMINIU, CU MANERE JL736L

Scaunul de dus din aluminiu, prevazut cu manere, este un dispozitiv ajutator pentru persoanele care dispun de o mobilitate redusa, fiind usor de folosit pentru a asigura toaleta zilnica.

CARACTERISTICI ale scaunului de dus din aluminiu, cu manere:

- Confectionat din aluminiu;
- Picioarele au varfuri confectionate din cauciuc, reducand riscul de alunecare;
- Inaltime sezut: 35-46.5 cm (reglabil pe 5 niveluri);
- Inaltime totala: 71-81 cm (reglabil pe 5 niveluri);
- Adancime sezut: 45 cm;
- Adancime totala: 51.5 cm;
- Latime sezut: 41 cm;
- Latime totala: 51 cm;
- Greutate maxima utilizator: 112,5 kg.



COMPONENTE scaun de dus din aluminiu, cu manere:

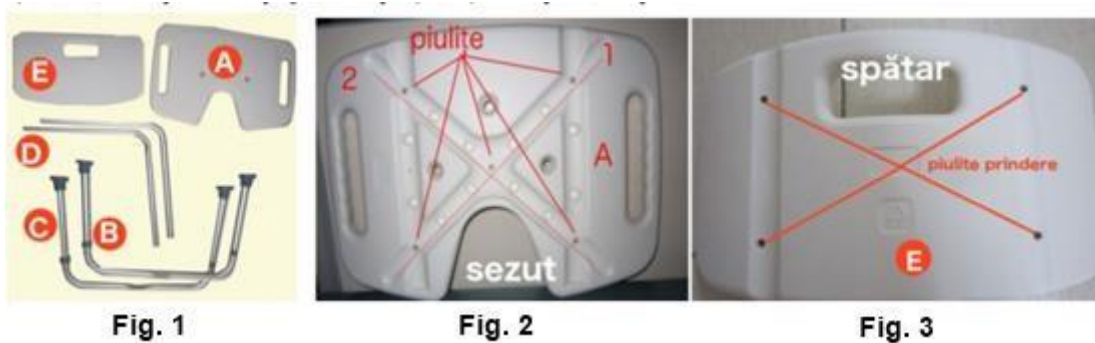


Fig. 1

A = sezut;

B, C = set picioare sprijin;

D = suport de susținere a spatelui;

E = Spatar.

Fig. 2

1, 2 = sunt marcate cele doua canale in care se vor plasa seturile de picioare. Pe spatele sezutului exista 5 piulite in care se vor insuruba suruburile de fixare a seturilor de picioare. **Fig. 3**


Pe spatar sunt 4 piulite.

MONTAJ scaun de dus din aluminiu, cu manere:

➤ **Montarea seturilor de picioare**

Setul B, in zona surubului central este aplatizat pe ambele parti, sus – jos, este setul care se va plasa intr-unul dintre canalele de montaj marcare 1 sau 2.

Setul C este aplatizat doar sus, adica in partea care se va suprapune peste setul B in zona surubului central.

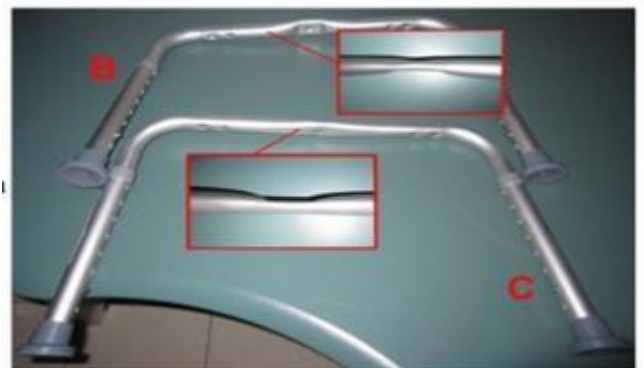

- ✓ Urmariti modul de asezare al picioarelor, cum se pun suruburile si saibele in vederea fixarii picioarelor de sezut.
- ✓ Se pune setul de picioare B, peste el se aseaza setul C.
- ✓ Suruburile din cele 4 colturi au saibe profilate care trebuie asezate conform detaliului de montaj din figura.
- ✓ In final fixati spatarul prin cele 4 suruburi ramase.



- ✓ Dupa ce ati verificat strangerile intoarceti scaunul in pozitie normala si il puteti utiliza.
- ✓ Inaltimea scaunului se regleaza ajustand inaltimea fiecarui picior, cu ajutorul butoanelor si a gaurilor de reglaj.
- ✓ Inainte de utilizare verificati cu atentie ca fiecare picior sa aiba aceeasi lungime.

- ✓ Dupa ce ati fixat spatarul, manerele se fixeaza in suruburi pe picioarele scaunului.



Tel call center: 0374.336.802 | Program comenzi telefonice: L-V 9-17

E-mail: contact@catenapascupas.ro | www.catenapascupas.ro